

# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

## 1. 어떤 경우에 JED가 적용될 수 있습니까?

JED는 진정제가 투여된 환자가 반듯하게 누워있는 어떤 경우에서든지 사용될 수 있습니다.

이 장비는 감시마취관리(Monitored Anesthesia Care /MAC)동안 사용되는 장비이지만, 기도 확보가 필요한 어떤 경우에서든지 사용하실 수 있습니다.

## 2. 어떤 사이즈의 환자에게 JED를 사용할 수 있습니까?

JED는 대략 6살 정도의 환자부터 몸무게가 180kg인 환자까지 사용이 가능합니다.

하악골을 받쳐주는 컵이 하악골의 위치 아래쪽에 위치될 수 있는 한, JED는 기도 확보를 위해 사용될 수 있습니다.

## 3. JED는 재사용이 가능한가요?

Head Support(머리 받침대)와 Arm(높낮이 조절용 팔)은 재사용이 가능하지만 Cup은 일회용입니다.

Cup은 한 환자에게 사용된 후에 폐기되어야 합니다.

만약 Head Support나 Arm이 더러워지면 제조사의 지시사항에 따라 세척할 수 있습니다.

## 4. JED를 고압증기멸균기(Autoclave)나 스테리스(Steris) 안에서 세척해도 되나요?

아니요. JED는 고압증기멸균기나 스테리스 안에서 세척하시면 안됩니다.

JED의 밑면에 보시면 세척 관련 지시사항이 나와있습니다.

## 5. 환자가 옆으로 누워있는 상태에서 JED를 사용해도 되나요?

아니요. JED는 반드시 환자가 반듯하게 누워있을 경우에만 사용되어야 합니다.

## 6. JED를 MRI에서 사용해도 되나요?

네, 사용 가능합니다.

**7. JED의 효과를 보여주는 연구 결과가 있습니까?**

네. 몇몇 임상연구와 출판물이 JED의 효과를 보여주고 있습니다.

**8. JED의 수명은 어느 정도인가요?**

Cup은 일회용이며, 한번 사용 후에는 폐기되어야 합니다.

Arm(높낮이 조절용 팔)의 교체가 필요하시면 교체용 Arm만 따로 구매하실 수 있습니다. (저희 쪽에 연락 주세요.)

JED는 2,000번 이상 사용이 가능합니다.

